

ZSI 100 CF IMPLANTE PENEANO FLEXIBLE




Más información
www.zsimplants.ch

Una solución para la disfunción eréctil neurológica
Un apoyo para los problemas neuro-urológicos




ZSI 100 CF

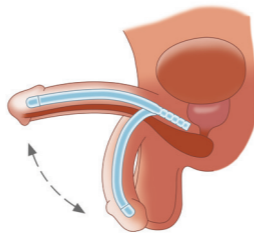


ANATOMÍA

Los cilindros del implante peneano ZSI 100 CF se introducen en el interior de la corpora cavernosa, en ambos lados del pene. El tejido interno de la corpora cavernosa (que antes se llenaba de sangre, para producir la erección del pene) se ajusta con dilatadores, de manera que se crea un espacio para insertar la prótesis. El implante peneano ZSI 100 CF no interfiere en la capacidad del paciente para orinar o eyacular. Tampoco afecta a la sensibilidad natural del pene o el glande.

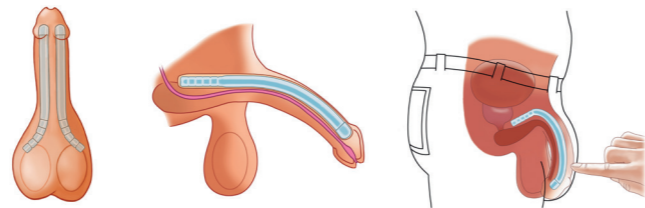


ACTO SEXUAL

Los varones con lesiones o enfermedades de la médula espinal pueden padecer disfunción eréctil, ya que los circuitos nerviosos implicados en las erecciones se ven afectados. Un par de implantes peneanos flexibles ZSI 100 CF, alojados en la corpora cavernosa, ofrecen los 500 g mínimos de resistencia a la presión necesarios para mantener relaciones sexuales satisfactorias con penetración.

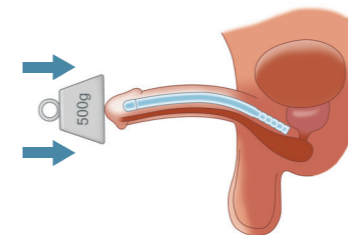


DESPUÉS DEL ACTO SEXUAL

Después de mantener relaciones sexuales, el pene se ajusta con facilidad a la ropa interior y los pantalones.

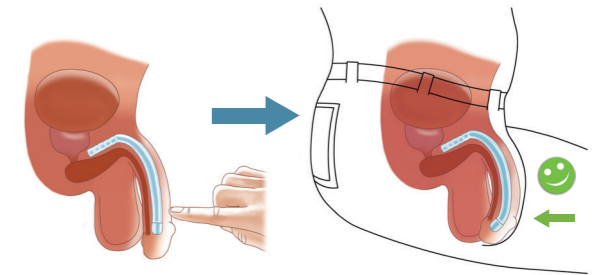


RIGIDEZ DURANTE EL ACTO SEXUAL

Dos cilindros de ZSI 100 CF flexibles: disponibles en diferentes diámetros que oscilan entre los 9 y los 13 mm y proporcionan la rigidez suficiente para que el paciente mantenga relaciones sexuales con penetración.

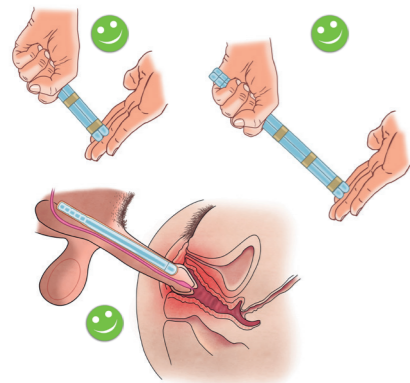


REVESTIMIENTO DE PVP

Implante ZSI 100 CF con revestimiento de PVP + antibióticos que previenen las infecciones

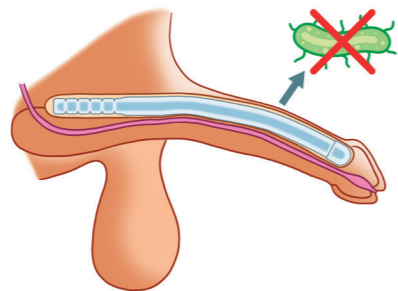


IMPLANTE PENEANO FLEXIBLE

Al ejercer cierta presión en el extremo de un pene con un implante flexible ZSI 100 CF, comprobará que se dobla con normalidad.

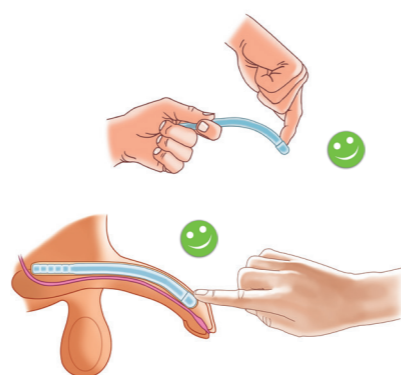


AUTOCATERETERISMO INTERMITENTE MÁS SENCILLO

La vejiga neurógena se suele tratar con la colocación de un catéter permanente, un catéter intermitente o de un dispositivo de drenaje urinario externo. Muchos pacientes no tienen la destreza suficiente para realizar un autocateterismo intermitente, lo que podría conllevar una perforación de la uretra, especialmente cuando el paciente tiene el pene retraído. Si embargo, el cateterismo intermitente realizado por otra persona no suele tener buena aceptación. El implante de pene flexible se alinea con la uretra, lo que hace que el autocateterismo intermitente sea mucho más sencillo y seguro.

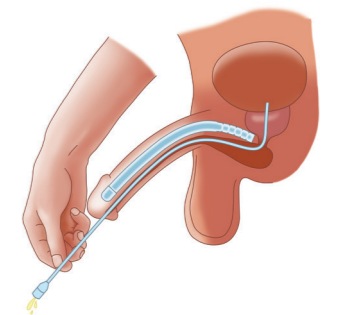


COMODIDAD PARA EL PACIENTE

El implante ZSI 100 CF es flexible, lo que garantiza la máxima comodidad para el paciente.

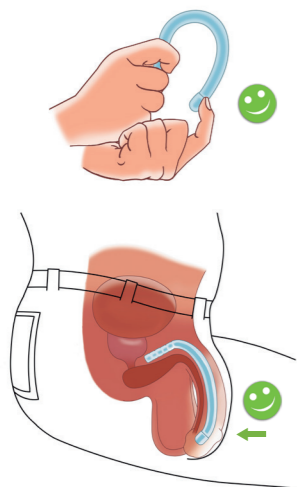

EL IMPLANTE PENEANO MALEABLE PODRÍA SER DEMASIADO RÍGIDO

El implante ZSI 100 CF es flexible, lo que garantiza la máxima comodidad cuando se está sentado.

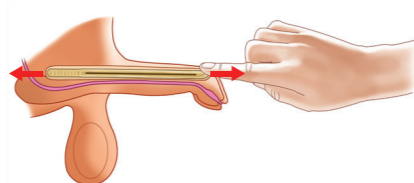


PRUEBE EL IMPLANTE

Recuerde probar el implante peneano flexible que desea comprar. Siga los pasos que se ilustran a continuación.




Compruebe su flexibilidad para garantizar comodidad. Compruebe su rigidez para mantener relaciones sexuales satisfactorias con penetración. Compruebe siempre que las varillas están unidas.


AYUDA A MANTENER EL COLECTOR URINARIO EN LA POSICIÓN CORRECTA

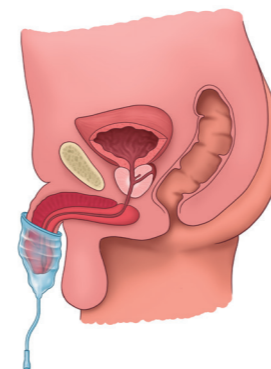

La vejiga neurógena suele tratarse con la colocación de un catéter permanente, un catéter intermitente o un colector urinario. La atrofia del pene causada por la disfunción eréctil crónica, la retracción refleja del pene o la flexión pélvica dificulta mantener los dispositivos de drenaje urinario externos en el lugar correcto. La obesidad puede ser otro de los problemas relacionados y puede hacer que el pene quede parcialmente cubierto y obstruido por el tejido circundante.

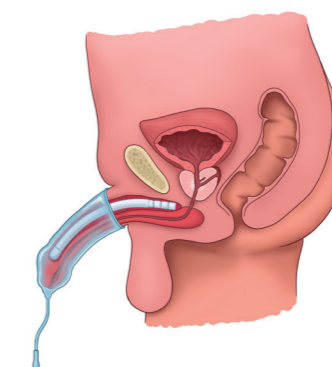

Los implantes peneanos flexibles ayudan a mantener los dispositivos de drenaje urinario externos sobre el pene, en particular, contribuyen a su correcta colocación y reducen los desgarros de la piel que suelen producir las sondas de Foley.

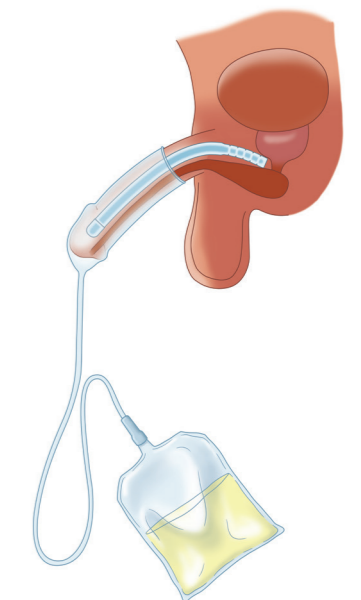

SEGURO PARA RMN Y ESCÁNERS DE AEROPUERTOS

Puede viajar con su implante ZSI 100 CF. Los escáneres de los aeropuertos no detectan este dispositivo. Asimismo, el implante ZSI 100 CF también es seguro para someterse a pruebas médicas en escáneres.

