


ZSI 200 NS EXPANDER

ENDOPROTHÈSE VAGINALE - STENT VAGINAL

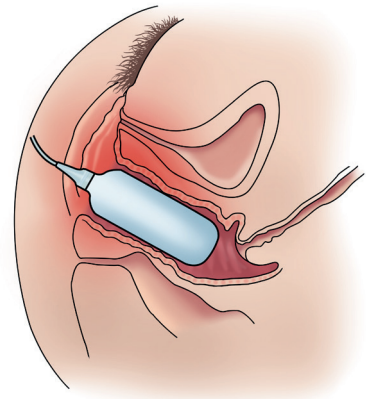

Une solution à utiliser
après une vaginoplastie ou radiothérapie


- Un cylindre gonflable, deux tailles.
- Pour plus d'information, visiter www.zsimplants.ch

LE ZSI 200 NS EXPANDER - ENDOPROTHÈSE VAGINALE EST CONÇU POUR S'ADAPTER À TOUTES LES TAILLES DE VAGIN

Pourquoi une endoprothèse vaginale (vaginal stent) pour les femmes cis?

Il y a un risque de sténose vaginale après une vaginoplastie ou une radiothérapie vaginale ou pelvienne.
L'endoprothèse vaginale peut diminuer ce risque.

Causes de la vaginoplastie: anomalies vaginales congénitales, blessures ou accidents, chirurgies oncologiques, etc.

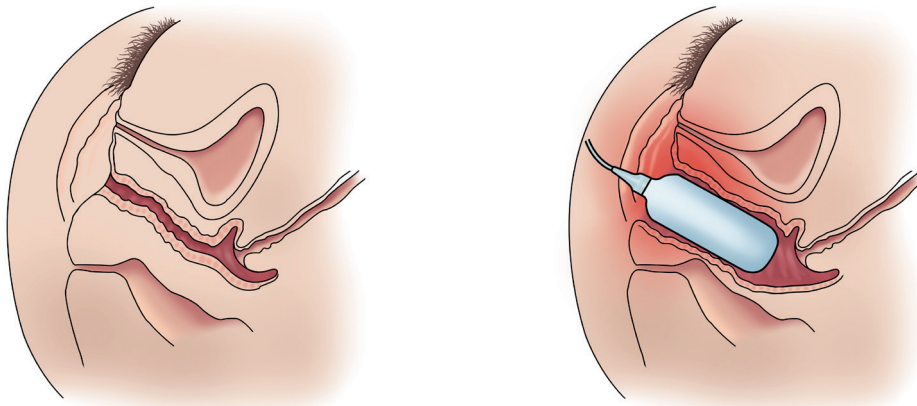

Description

Le dispositif est un cylindre gonflable équipé d'un clamp et d'un connecteur.

Le dispositif est en silicone biocompatible.

Longueurs disponibles: 90 mm & 120 mm

Diamètre gonflé: 40 mm



Mode d'emploi

Mesurer la longueur du vagin. Choisir la taille du dispositif adéquate: 90 mm ou 120 mm.

Ouvrir l'emballage.

Attention, ne pas utiliser d'objet contondant.

Introduire le dispositif dans le vagin et le remplir (90 mm = 100 ml, 120 mm = 130 ml) puis clamer.

Déclamer et vider le dispositif pour le retirer.