


ZSI 200 NS EXPANDER STENT VAGINAL

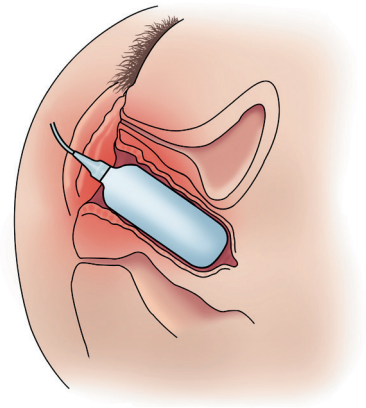


Una solución para usar
después de la **vaginoplastía**

- Un cilindro inflable, dos tamaños.
- Para más información, visitar www.zsimplants.ch

EL ZSI 200 NS EXPANDER - STENT VAGINAL ESTA DISEÑADO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE NEO-VAGINA


Porqué un expansor vaginal después de una vaginoplastia?

Después de una vaginoplastia, existe el riesgo de estenosis.
El expansor vaginal permite reducir este riesgo.

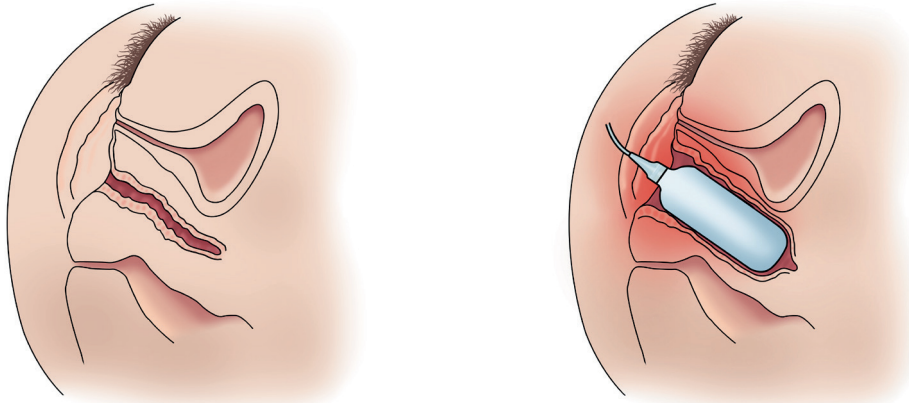

Descripción

El dispositivo es un cilindro inflable con clamp y conector.
El dispositivo esta hecho de silicona biocompatible.
Tamaños disponibles: 90 mm & 120 mm
Diámetro inflado: 40 mm

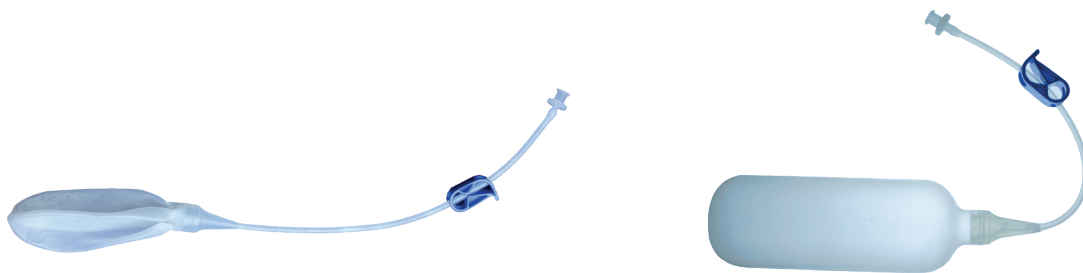

Modo de uso

Medir la longitud de la vagina.
Elegir el tamaño adecuado del dispositivo: 90 mm ou 120 mm.
Abrir el empaque. Cuidado, no usar objeto contundente.
Introducir el dispositivo en la vagina y llenarlo (90 mm = 100 ml, 120 mm = 130 ml) luego clampear.
Desclampear y vaciar el dispositivo para sacarlo.