


ZSI 100 CF

IMPLANTE PENEANO BLANDO

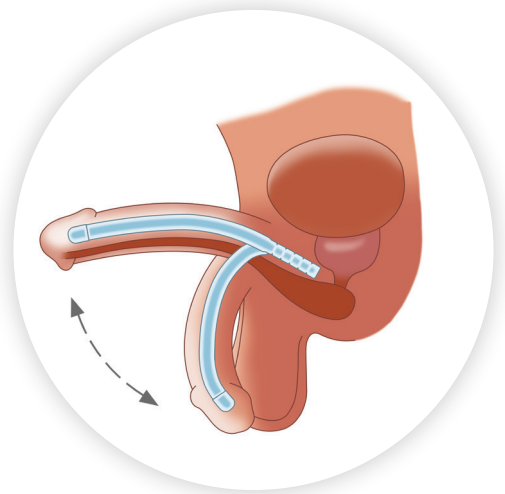

Una solución blanda para
la disfunción eréctil

- Un par de implantes, para todos los tamaños.
- Más información, visita www.zsimplants.ch

EL IMPLANTE PENEANO BLANDO ZSI 100 CF ESTA DISEÑADO PARA BRINDAR RESULTADOS COSMÉTICOS EXCELENTES

DESCRIPCIÓN:



El implante peneano blando sin cable ZSI 100 CF esta diseñado para tratamiento de la disfunción erectil o para mantener el espacio sin dejar que se instale la fibrosis durante el tiempo de cicatrización después de haber sacado un implante peneano hidráulico por infección. Esta compuesto de dos cilindros flexibles hechos de silicona y recubiertos de PVP para luchar contra la infección. Se insertan en los cuerpos cavernosos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. ZSI 100 CF para tratar la disfunción erectil: el paciente puede necesitar una prótesis flexible para erecciones suficiente rígidas para penetración de la vagina.

Procedimiento: abrir el cuerpo cavernoso para hacer espacio con un dilatador entre el cuerpo cavernoso interno y los tejidos eréctiles. Insertar el ZSI 100 CF en cada cuerpo cavernoso y cerrar.

2. ZSI 100 CF para mantener el espacio en los cuerpos cavernosos: en caso de sacar una prótesis hidráulica por infección, el cirujano puede mantener el espacio abierto en los cuerpos cavernosos con el ZSI 100 CF. Después de 3 a 6 meses, la inserción de una nueva prótesis hidráulica sera facilitada gracias al ZSI 100 CF. Notar que el ZSI 100 CF D9 / ZSI 100 CF D11 / ZSI 100 CF D13 están recubiertos de PVP para luchar contra la infección.

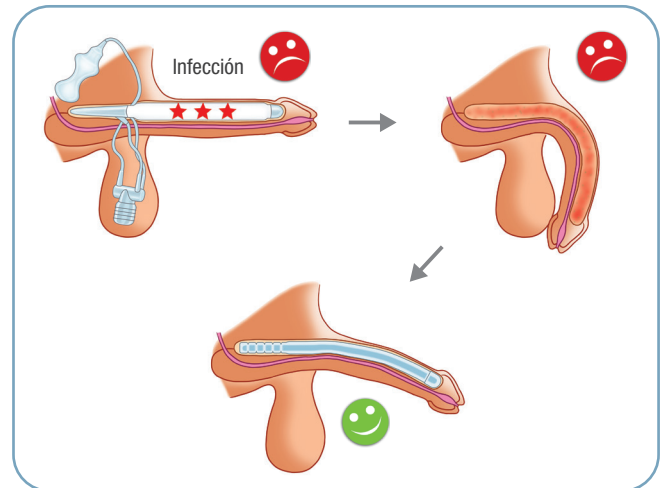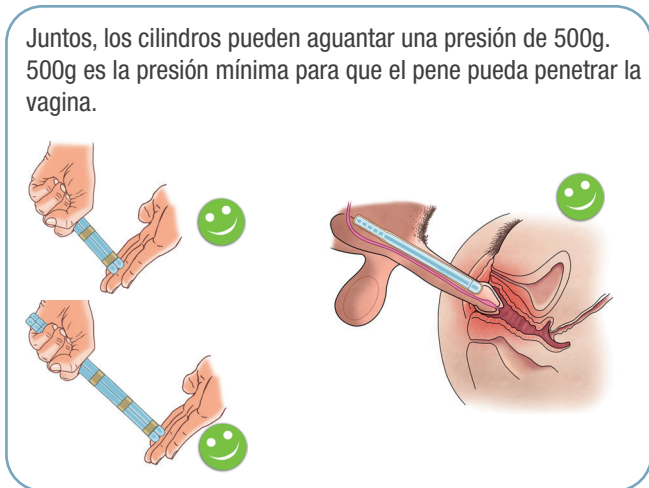

**UN PAR DE IMPLANTES RECUBIERTOS DE PVP, 3 DIÁMETROS: 9 MM / 11MM / 13 MM
AJUSTABLES EN LAS PARTES PROXIMAL Y DISTAL DE 12 HASTA 25CM
IMPLANTACIÓN FÁCIL PARA UN COMFORT DEL PACIENTE OPTIMO**

PARTE PROXIMAL
10 mm por 10 mm
Largo total 50 mm
Ajustable cortándolo

- 3 diámetros: 9 mm / 11mm / 13 mm para todos los pacientes estándar.
- Silicona **NUSIL** para una durabilidad y biocompatibilidad óptimas.

