


ZSI 475 IMPLANTE PENIL HIDRÁULICO

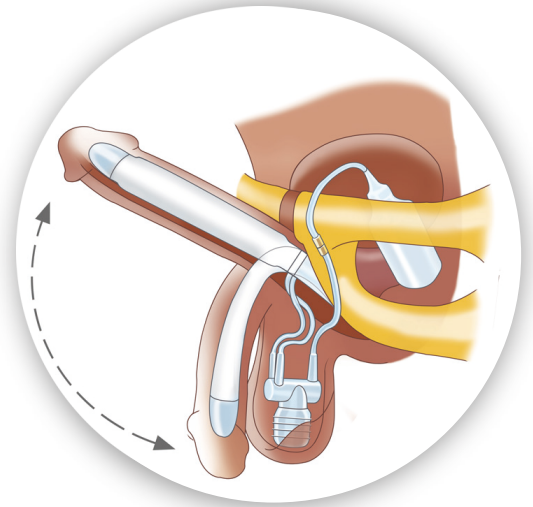

La solución
para la disfunción erectil

- Todos los tamaños en una sola caja.
- más información en www.zsimplants.ch

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 475 está certificado por la UE

Distribuidor Local

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland




Volante Español
Version 2, Junio 2016



TODAS LAS LONGITUDES DE IMPLANTES Y ACCESORIOS PENILES ESTÁN DISPONIBLES EN UNA SOLA CAJA*

* La parte del pene de tamaño grande de 22 cm (de 21 a 25 cm) está disponible con extensiones en una caja separada.

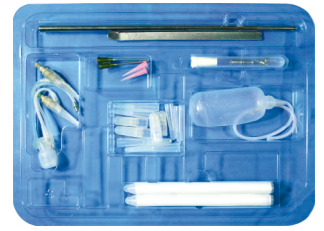

INTRODUCTOR CON REGLA

ESPATULA



PARTES PROXIMALES

BOMBA



AGUJAS PARA INTRODUCTOR Y CONECTOR



DEPÓSITO 80 ml



AGUJAS PARA RELLENAR LA SOLUCIÓN



Longitud 13 16 19 (cm)
Cuando está inflado Ø 16 16 18 (mm)

PARTES DISTALES - PRÓTESIS DE CUERPO CAVERNOSO
Longitud 13 cm y 16 cm Ø ANILLO 12,5mm. Longitud 19 cm Ø ANILLO 14mm.



EXTENSIONES DISTALES Y PROXIMALES

ENSAMBLE



SELECCIONE LA LONGITUD DERECHA DE LA PARTE DISTAL



AGREGUE UNA EXTENSIÓN SI ES NECESARIO



ATORNILLE LA PARTE DISTAL A LA PARTE PROXIMAL


Longitud grande de 22 cm, diámetro de 21 mm cuando está inflado, Ø ANILLO 14mm.



PRESIONE EL BULBO PARA INFLAR LA PRÓTESIS
EL DIÁMETRO AUMENTA A MEDIDA QUE SE INFLA LA PRÓTESIS


FUNCIONAMIENTO

1

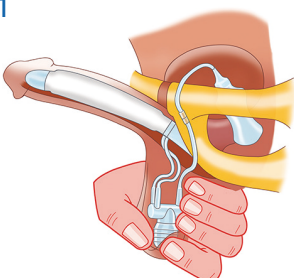


Presione el bulbo para inflar la prótesis

2

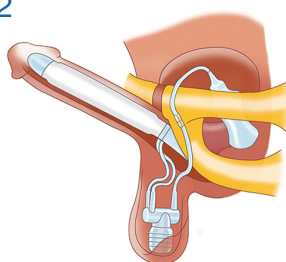


El pene está erecto

3

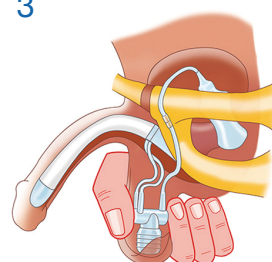

Presione el cilindro para desinflar la prótesis

4

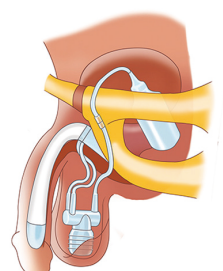

El pene está flácido