



A SOLUÇÃO PARA A IMPOTÊNCIA MASCULINA

ZSI 475
PRÓTESE PENIANA HIDRÁULICA
(3 COMPONENTES)



TODOS OS TAMANHOS EM SOMENTE UMA CAIXA

Desde 12 cm até 24 cm e mais (com extensões)

Maiores informações em: www.russer.com

Rua Antônia Martins Luis, 589
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP
CEP 13347-404
Telefone: + 55 (19) 3825 9900
Fax: + 55 (19) 3825 9905
www.russer.com.br | russer@russer.com.br



Panfleto Português
Versão 4, Maio 2015






TODOS OS TAMANHOS DE IMPLANTE E ACESSÓRIOS PENIANOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM SOMENTE UMA CAIXA*

* A parte do penis de tamanho grande de 22 cm (de 21 a 25 cm) estão disponível com extensões em uma caixa separada.



INTRODUCTOR COM RÉGUA

ESPÁTULA

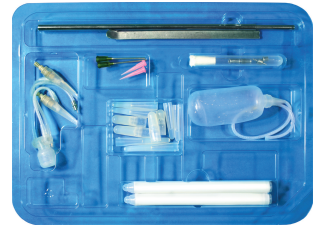

PARTES PROXIMAIS

BOMBA



PROBES PARA INTRODUCTOR E CONECTOR

DEPÓSITO 80ML



AGULHAS PARA ENCHER COM SOLUÇÃO



Comprimento 13 16 19 (cm)
Quando está Inflado 16 16 18 (mm)
PARTES DISTAIS - PROTESE DO CORPO CAVERNOSO
CIRCUNFERÊNCIA DE Ø ANEL 12.5 mm



cm 1 2 0,5 1 2 3
EXTENSÕES DISTAIS E PROXIMAIS

MONTAGEM DOS CILINDROS INFLÁVEIS



SELECIONE O COMPRIMENTO DIRETO DE PARTE DISTAL



ADICIONE UMA EXTENSÃO SE NECESSÁRIO




PARAFUSE A PARTE DISTAL COM PARTE PROXIMAL

Comprimento grande de 22 cm, diâmetro de 21 mm quando esta inflado.
Circunferência de Ø anel 13 mm




PRESIONE A BOMBA PARA INFLAR A PRÓTESE O DIÂMETRO AUMENTA A MEDIDA EM QUE A PROTESE INFLA


FUNCIONAMENTO

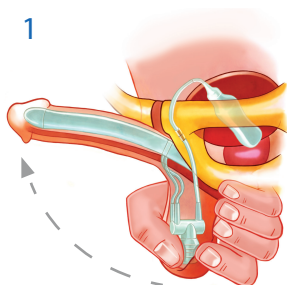


1 Presione a bomba para inflar a prótese

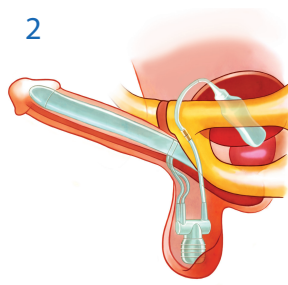

2 O pênis esta ereto

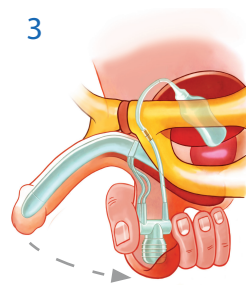

3 Presione o cilindro para desinflar a prótese

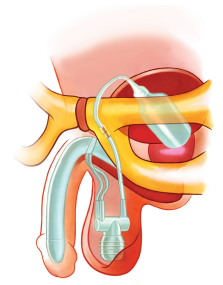

4 O penis está flácido